



Película Protectora sin ardor

Cavilon™

Protector cutáneo

Descripción

La película protectora sin ardor Cavilon™ es una solución Polimérica que forma una película uniforme cuando se aplica sobre la piel. El producto se dispersa en un solvente no irritante, no citotóxico que seca rápidamente.

La película es incolora y tiene una buena permeabilidad al oxígeno y al vapor húmedo. Actúa como una capa protectora entre la piel y los productos de desecho del organismo, fluidos, humedad, productos adhesivos y fricción.

Ayuda a proteger la piel intacta o dañada contra la irritación provocada por la incontinencia urinaria y/o fecal, fluidos digestivos, supuraciones de heridas, adhesivos y fricción.

Uso

- Puede ser usada en adultos e infantes mayores de 1 mes como barrera primaria contra la irritación por fluidos corporales
- Mantenimiento de la Integridad de la Piel: protección de la piel contra los efectos dañinos de la fricción y humedad
- Dermatitis Asociada a Incontinencia: protege la piel de la irritación causada por heces y orina
- Ostomías: protege la piel contra orina, heces y productos adhesivos utilizados para fijar la bolsa
- Heridas: protege la piel del exudado emanado de la herida y productos adhesivos utilizados
- Trauma Adhesivo: protección de la piel contra los adhesivos de uso médico
- Protección de la piel alrededor de tubos, drenajes o sondas



Características Físicas y Químicas

La película protectora sin Ardor Cavilon™ esta compuesta por:

- Isooctano y Hexametildisilxano: Son solventes a base de silicona, no tóxicos y de evaporación rápida (15 – 30 segundos)
- Termopolímero de Acrilato: Polímero acrílico formador de la película
- Polifenilmetilsiloxano: Plastificante flexible que no se agrieta o fisura

Este producto no posee principios activos, es decir no interactúa con el metabolismo de la piel



Película Protectora sin ardor Cavilon™ Máne

Ventajas y Beneficios de Uso

- Protege la piel por 72 horas contra la irritación producida por la incontinencia, ahorrando tiempo y dinero al profesional de la salud
- No ocluye pañales ni interfiere con almohadillas absorbentes
- Es hipoalergénica, estéril
- No es citotóxica, es decir, no interfiere en el proceso de cicatrización
- Se puede aplicar en piel intacta y lesionada
- Aplicación sin dolor o irritación, incluso sobre piel lesionada (al no contener alcohol, no irrita)
- No es removida por el agua, se desprende con el cambio normal del estrato corneo de la piel
- No se absorbe ya que, se polimeriza rápidamente quedando unida a la piel
- Es transparente y permite visualizar la piel
- Permite el normal intercambio gaseoso de la piel entre el oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua
- Es compatible con adhesivos de uso médico, no contiene fragancias o preservantes

- Almacenar en un lugar fresco y seco
- Temperatura: 15° - 30°C (59° - 86°F)
- Ver fecha de vencimiento
- El producto en su forma líquida es inflamable por lo que debe usarse en lugares Ventilados
- Mantener fuera del alcance de los niños

Aprobaciones

Dermatológicamente aprobado.

Producto registrado en el M.P.P.S bajo el número P.M.P 19816.

Presentación del Producto

Modelo	# de Stock	Descripción	Cantidad
3343E	VH000041846	Película Protectora sin ardor Cavilon™ - hisopo de 1 ml.	Caja/ 4 cajitas/ 25 unidades.
3346E	VH000041853	Película Protectora sin ardor Cavilon™ - frasco aerosol de 28 ml.	Caja/ 12 fracos.

Tiempo de vida en el anaquel

El tiempo de vida es de 3 años a partir de la fecha de elaboración.

Recomendaciones - Advertencias

- Aplicar sobre la piel limpia y seca
- Reaplicar cada 24 a 72 horas, considerar frecuencia de limpieza del área donde se está utilizando el producto



División Cuidados para la Salud

Av. Tamanaco, Centro Empresarial El Rosal, Piso 6. El Rosal, Caracas 1060
RIF J000671656 NIT 0001803000
Teléfono: 0800-TRESM (8737666) / +58 212 957 81 11



Impreso en Caracas-Venezuela
© 3M 2009. Todos los derechos reservados